


# BWS Aufrichtung

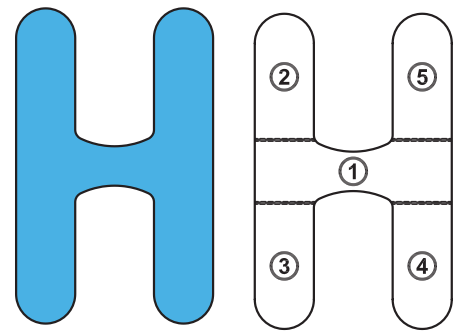

## Effekte

Das PreCut Tape BWS Aufrichtung kann folgendes leisten:


- Verbessert die Ansteuerung der Muskulatur der BWS und des Schultergürtels
- Reduziert den Schmerz und verbessert die funktionelle Stabilität bei freier Beweglichkeit
- Stellt normale Muskelaktivität wieder her
- Verbessert die Leistungsfähigkeit
- Kontinuierliche Stimulation zur Unterstützung einer verbesserten Aufrichtung

Zur Verbesserung der Aufrichtung der BWS und des Schultergürtels.

## Indikationen


Die Anlage eines PreCut Tape BWS Aufrichtung hat sich z.B. bewährt bei:

- Schulterverletzungen
- Schmerzen der mittleren BWS
- Haltungsinsuffizienz
- M. Scheuermann
- Schulter Nackenschmerzen
- Postoperativer Rehabilitation
- Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit

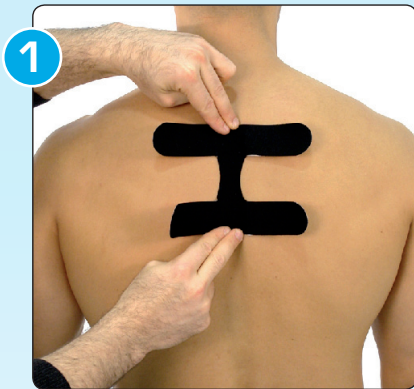


1

- Zur Vorbereitung der Anlage brechen Sie alle Perforationen an der Rückseite des Tapes auf. Der Patient steht in einer bequemen aufrechten Position.
- Entfernen Sie das Papier von Abschnitt 1 und legen Sie das Tape entlang der Dornfortsatzreihe zwischen den Schulterblättern an.
- Reiben Sie nun leicht über das Tape, um den Kleber zu aktivieren.

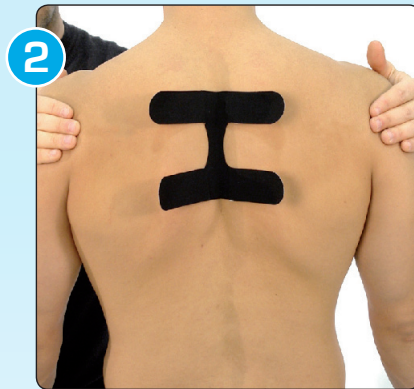

2

- Nun richtet sich der Patient aktiv, bringt seine Schulterblätter nach hinten unten und nimmt eine optimale Haltung ein.

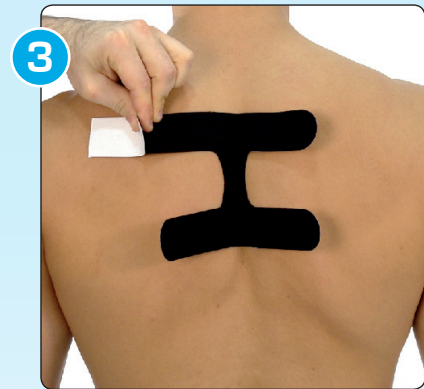


3

- Entfernen Sie das Papier von Abschnitt 2 und legen Sie das Tape unter leichtem Zug nach außen an.




4

- Entfernen Sie das Papier von Abschnitt 3 und legen Sie das Tape unter leichtem Zug nach außen an.

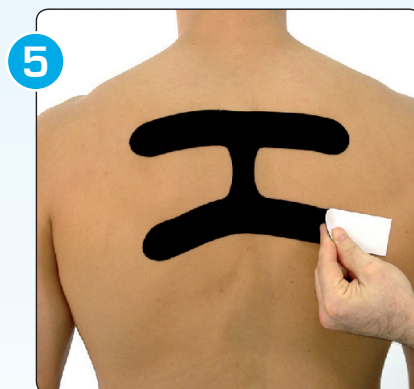

5

- Entfernen Sie das Papier von Abschnitt 4 und legen Sie das Tape unter leichtem Zug nach außen an.

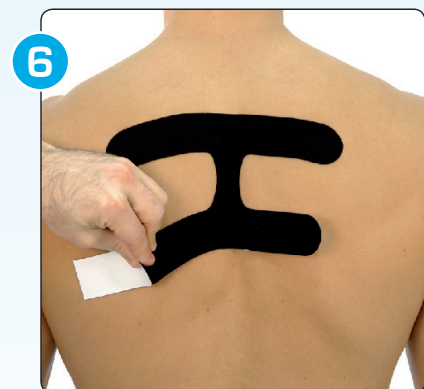

6

- Entfernen Sie das Papier von Abschnitt 4 und legen Sie das Tape unter leichtem Zug nach außen an.
- Nach beendeter Anlage reiben Sie leicht über das Tape, um den Kleber zu aktivieren